


# RELIANCE™ PTX ENDOSKOP-AUFBEREITUNGSSYSTEM



Dieses Wallchart dient ausschließlich als Routineanleitung und als Hilfe; lesen und befolgen Sie stets die Anweisungen auf dem Produktetikett, im Benutzerhandbuch und der Gebrauchsanweisung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter oder klinischen Ansprechpartner von STERIS.




1 Ein- oder zweikanalige Endoskope oder bis zu 6 Endoskope ohne Kanalsystem für die Aufbereitung auswählen

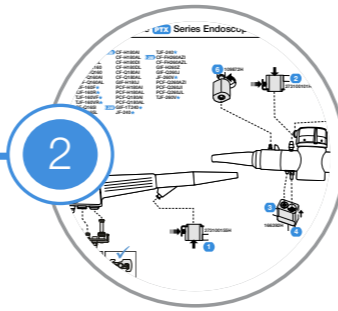

2 Siehe PTX Wallchart für erforderlichen Schlauch für Dichtigkeitstest und erforderliche Konnektoren




3 Ventilknöpfe abnehmen und Kontaktschutzkappe je nach Modell aufsetzen

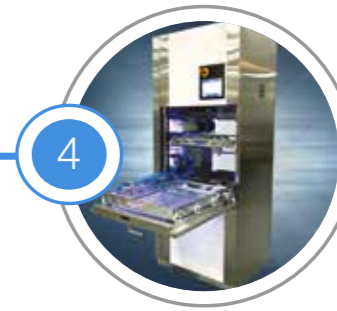

4 PTX-Tür auf der unreinen Seite öffnen und Korb (oben oder unten) auf heruntergeklappte Tür herausziehen



5 Endoskop(e) und zugehörige Ventile in jeden Korb legen, Schlauch für Dichtigkeitstest und erforderliche Konnektoren anschließen

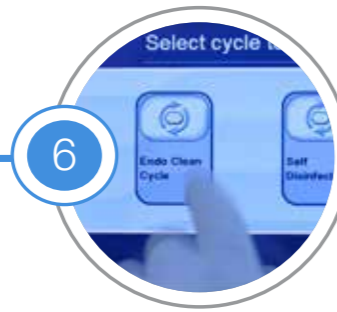

6 Endoskopzyklus-Symbol auswählen



7 ID eines jeden Endoskops mit dem Barcode-Lesegerät eingeben bzw. durch die Liste scrollen und auf OK drücken. Danach die Bediener-ID in die PTX eingeben




8 Körbe hineinschieben, PTX-Tür schließen und auf OK drücken, um den Zyklus zu starten



9 PTX-Zyklus läuft, Türbeleuchtung leuchtet weiß



10 PTX-Zyklus abgeschlossen, Türbeleuchtung leuchtet grün

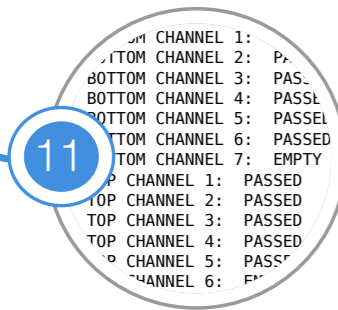

11 Auf der reinen Seite das Zyklusprotokoll und den Abschluss des Zyklus kontrollieren und überprüfen ob die wichtigsten Parameter erfüllt wurden („Passed“)



12 Tür auf der reinen Seite öffnen und Körbe herausziehen. Überprüfen, ob die Anschlüsse noch fest sitzen; wenn ja, Steckverbinder trennen, wenn nicht anhand der Schritte 6 bis 12 kontrollieren und nach Festziehen der Anschlüsse neu aufbereiten



13 Endoskop(e) in den Trockenschrank geben oder mit dem nächsten Aufbereitungsschritt fortfahren




14 Körbe auf der reinen Seite hineinschieben und PTX-Tür schließen

## Nutzen Sie die klinische Toolbox

Machen Sie sich die Werkzeuge zunutze, um wertvolle Kenntnisse zu gewinnen.

Senden Sie Ihre Fragen an [educationdesk@steris.com](mailto:educationdesk@steris.com) oder besuchen Sie [university.steris.com](http://university.steris.com)

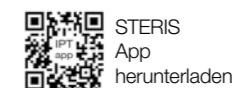

[www.steris-healthcare.com](http://www.steris-healthcare.com)